

THERAPIESCHUHE
POST-OP
MAI 2016





Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

wir freuen uns, Ihnen unsere TheraPieschuhe in einem ganz neuen Rahmen präsentieren zu können.

Der vorliegende Katalog enthält alle FIOR & GENTZ TheraPieschuhmodelle, die speziell für die Versorgung nach einer Operation bzw. nach einer Verletzung konzipiert worden sind.

Neben der Einteilung in Verbands- und Entlastungsschuhe gibt Ihnen das Inhaltsverzeichnis einen Überblick über die verschiedenen Schaft- und Sohlenkonstruktionen. Alle Details zum Schuhmodell finden Sie direkt auf der jeweiligen Produktseite. Auch die passende Innensohle wird dort aufgeführt.

Informationen zu den Schuhgrößen und Messverfahren finden Sie ab Seite 50, passendes Zubehör wie z. B. Schutzkappen ab Seite 52.

Unser Ziel ist es, Sie mit unseren Produkten bestmöglich bei der Patientenversorgung zu unterstützen. Weitere TheraPieschuhmodelle finden Sie in den **Produktkatalogen DIABETES und HOMECARE.**

Mit besten Grüßen aus Lüneburg
Ihr Jörg Fior und Ralf Gentz

All unsere Produkte entsprechen unserem hohen Anspruch an Qualität. Der Qualitätsstandard ist durch eine unabhängige Zertifizierungsgesellschaft nach den internationalen Normen ISO 9001 und ISO 13485 geprüft und bescheinigt.



VERKAUF IM AUSSENDIENST

Frank Hehemann
Orthopädietechniker
Tel.: +49 163 4343627
PLZ: 40-48, 50-53 und 57-59



Jan Gerrit Keikus
Orthopädietechnikermeister
Tel.: +49 170 5615917
PLZ: 19-34, 37-39 und 49



Martin Klose
Orthopädietechniker
Tel.: +49 160 90175259
PLZ: 01-18 und 99



Fritz Weimann
Orthopädietechnikermeister
Tel.: +49 151 40259232
PLZ: 35-36, 54-56, 60-79 und 88-89



Florian Wiemeier
Orthopädietechnikermeister
Tel.: +49 170 7948222
PLZ: 80-87 und 90-98



Luc Schols
Area Manager Benelux
Tel.: +49 151 40259231



VERKAUF IM INNENDIENST

Katharina Bäßmann



Oxana Behncken



Stella-Kathleen Cordes



Micha Himmel



Michael Krüger



Anna-Lena Kühn



VERKAUF IM INNENDIENST

Für anfallende Fragen, Bestellungen und die Bearbeitung Ihrer Kundendaten erreichen Sie uns an Werktagen von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter +49 4131 24445-0.

Wenn Sie bis 16:15 Uhr bestellen, versenden wir die Waren noch am selben Tag. Samstagszustellungen und Expresslieferungen sind möglich.

EINLEITUNG

WILLKOMMEN	2-3
SERVICE UND SUPPORT	4-5
SCHUHEIGENSCHAFTEN	8-9

VERBANDSSCHUHE

ASYMMETRISCHE SCHUHE MIT HOHEM SCHAFT

Rigide Sohle mit extra starker Rolle und Sprengung, 30 mm dick

FLENSBURG	10-11
ERFURT	12-13
AUGSBURG	14-15

SYMMETRISCHE SCHUHE MIT NIEDRIGEM SCHAFT

Rigide Sohle mit extra starker Rolle und Sprengung, 30 mm dick

BREMEN	16
TOKIO	17
STUTTGART	18
MADRID	19

SYMMETRISCHE SCHUHE MIT HOHEM SCHAFT

Rigide Sohle mit extra starker Rolle und gerader Oberseite, 30 mm dick

AMSTERDAM	20
FREIBURG	21
OSLO	22
HAMBURG	23
REGENSBURG	24
ROSTOCK	25

VORFUSSENTLASTUNGSSCHUHE

SYMMETRISCHE SCHUHE MIT HOHEM SCHAFT

Rigide Sohle mit extra starker Rolle und gerader Oberseite, 40 mm dick

KOPENHAGEN	26
FRANKFURT	27
HELSINKI	28
LÜBECK	29

SYMMETRISCHE SCHUHE MIT HOHEM SCHAFT

8° Keilsohle (60:40) mit Vorfußrolle, 30 mm dick

LONDON	30
MAINZ	31

8° Keilsohle (60:40) mit Vorfußunterstützung, 30 mm dick

HANNOVER	32
MAILAND	33
KÖLN	34
STOCKHOLM	35

10° Keilsohle (50:50) mit Vorfußunterstützung, 30 mm dick

STENDAL	36-37
---------------	-------

10° Keilsohle (50:50) mit Vorfußunterstützung, 40 mm dick

LÜNEBURG	38-39
----------------	-------

10° Keilsohle (50:50) ohne Vorfußunterstützung, 40 mm dick

BERLIN	40-41
BORDEAUX	42-43

10° Keilsohle (30:70) ohne Vorfußunterstützung, 30 mm dick

KAISERSLAUTERN	44-45
----------------------	-------

RÜCKFUSSENTLASTUNGSSCHUHE

SYMMETRISCHE SCHUHE MIT HOHEM SCHAFT

5° Keilsohle (20:80) ohne Rückfußunterstützung, 30 mm dick

MÜNCHEN	46
MARSEILLE	47
WUPPERTAL	48-49

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

SCHUHINNENMASSE	50-51
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR	52-58
WEITERE SCHUHKATALOGE	59





SCHUHSOHLLE

Die rigiden Sohlen bestehen aus EVA-Vollmaterial. Diese Konstruktion verhindert eine Flexion der Zehengrundgelenke und sorgt dafür, dass der Fuß des Patienten stabilisiert und ruhiggestellt wird. So wird eine vorhandene Wunde optimal entlastet und die Wundheilung bestmöglich unterstützt. Durch Beschleifen und/oder Verkleben können die Sohlen an patientenspezifische Besonderheiten angepasst werden.



WASCHBAR

Alle Verbands- und Entlastungsschuhe können bei 40 °C gewaschen werden.

ATMUNGSAKTIV

Alle Schuhe verfügen über ein atmungsaktives Obermaterial.

VERSTÄRKTE FERSENKAPPE

Alle Verbands- und Vorfußentlastungsschuhe mit geschlossenem Fersenbereich sind mit verstärkten Fersenkappen ausgestattet, die dem Patienten Halt geben, die Ferse polstern und für komfortable Stabilität sorgen.



ANPASSBARES INNENVOLUMEN

Mithilfe der großzügigen Klett- und Spannlaschenverschlüsse kann das Innenvolumen an individuelle Platzbedürfnisse eines Patienten angepasst werden.



INNENSOHLEN

Die Innensohlen bestehen aus PA- oder EVA-Material und sind in die jeweiligen Schuhe eingelegt oder eingeklettet. Durch Bearbeiten der Innensohlen können das Innenvolumen und der Härtegrad der Polsterung an individuelle Platz- und Entlastungsbedürfnisse eines Patienten angepasst werden. Bei Bedarf können die Innensohlen durch eine individuelle Fußbettung ersetzt werden.



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

FLENSBURG eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Fußbereich/Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen), Schwellungen im Fußbereich (z. B. durch Entzündungen) oder Gelenkschmerzen im Fußbereich (z. B. durch Rheuma oder Arthrose) einen geschlossenen Schuh mit einem individuell anpassbaren Innenraum und hohem Schaft benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNGEN

Der asymmetrische Verbandsschuh FLENSBURG ist in den Weiten STANDARD und BREIT erhältlich.

SOHLENKONSTRUKTION

FLENSBURG verfügt über eine 30 mm dicke, rigide Sohle mit extra starker Rolle und Sprengung.

INNENSOHLEN

Im Schuh befinden sich drei 5 mm dicke EVA-Innensohlen (STANDARD F00053-XX und BREIT F00054-XX), von denen die obere Innensohle eine antimikrobielle Beschichtung aufweist.

BESONDERHEITEN

FLENSBURG bietet, insbesondere in der Variante BREIT, viel Raum für Verbände und besondere Platzanforderungen. Mithilfe des Fersenreißverschlusses kann der Schuh an- und ausgezogen werden, ohne die Klettverschlüsse öffnen zu müssen. Zudem verfügt der Schuh über eine integrierte Zehenkappe für mehr Stabilität und Schutz im Zehenbereich.

HMV-NUMMER: FLENSBURG STANDARD 31.03.03.4073 FLENSBURG BREIT 31.03.03.4xxx



FLENSBURG STANDARD

Schuhgröße	Art.-Nr. Paar	Art.-Nr. Linker Schuh	Art.-Nr. Rechter Schuh
35	TS5311-35	TS5311-35/L	TS5311-35/R
36	TS5311-36	TS5311-36/L	TS5311-36/R
37	TS5311-37	TS5311-37/L	TS5311-37/R
38	TS5311-38	TS5311-38/L	TS5311-38/R
39	TS5311-39	TS5311-39/L	TS5311-39/R
40	TS5311-40	TS5311-40/L	TS5311-40/R
41	TS5311-41	TS5311-41/L	TS5311-41/R
42	TS5311-42	TS5311-42/L	TS5311-42/R
43	TS5311-43	TS5311-43/L	TS5311-43/R
44	TS5311-44	TS5311-44/L	TS5311-44/R
45	TS5311-45	TS5311-45/L	TS5311-45/R
46	TS5311-46	TS5311-46/L	TS5311-46/R
47	TS5311-47	TS5311-47/L	TS5311-47/R
48	TS5311-48	TS5311-48/L	TS5311-48/R
49	TS5311-49	TS5311-49/L	TS5311-49/R
50	TS5311-50	TS5311-50/L	TS5311-50/R

FLENSBURG BREIT

Schuhgröße	Art.-Nr. Paar	Art.-Nr. Linker Schuh	Art.-Nr. Rechter Schuh
35	TS5911-35	TS5911-35/L	TS5911-35/R
36	TS5911-36	TS5911-36/L	TS5911-36/R
37	TS5911-37	TS5911-37/L	TS5911-37/R
38	TS5911-38	TS5911-38/L	TS5911-38/R
39	TS5911-39	TS5911-39/L	TS5911-39/R
40	TS5911-40	TS5911-40/L	TS5911-40/R
41	TS5911-41	TS5911-41/L	TS5911-41/R
42	TS5911-42	TS5911-42/L	TS5911-42/R
43	TS5911-43	TS5911-43/L	TS5911-43/R
44	TS5911-44	TS5911-44/L	TS5911-44/R
45	TS5911-45	TS5911-45/L	TS5911-45/R
46	TS5911-46	TS5911-46/L	TS5911-46/R
47	TS5911-47	TS5911-47/L	TS5911-47/R
48	TS5911-48	TS5911-48/L	TS5911-48/R
49	TS5911-49	TS5911-49/L	TS5911-49/R
50	TS5911-50	TS5911-50/L	TS5911-50/R



ERFURT STANDARD

Schuhgröße	Art.-Nr. Paar	Art.-Nr. Linker Schuh	Art.-Nr. Rechter Schuh
35	TS5310-35	TS5310-35/L	TS5310-35/R
36	TS5310-36	TS5310-36/L	TS5310-36/R
37	TS5310-37	TS5310-37/L	TS5310-37/R
38	TS5310-38	TS5310-38/L	TS5310-38/R
39	TS5310-39	TS5310-39/L	TS5310-39/R
40	TS5310-40	TS5310-40/L	TS5310-40/R
41	TS5310-41	TS5310-41/L	TS5310-41/R
42	TS5310-42	TS5310-42/L	TS5310-42/R
43	TS5310-43	TS5310-43/L	TS5310-43/R
44	TS5310-44	TS5310-44/L	TS5310-44/R
45	TS5310-45	TS5310-45/L	TS5310-45/R
46	TS5310-46	TS5310-46/L	TS5310-46/R
47	TS5310-47	TS5310-47/L	TS5310-47/R
48	TS5310-48	TS5310-48/L	TS5310-48/R
49	TS5310-49	TS5310-49/L	TS5310-49/R
50	TS5310-50	TS5310-50/L	TS5310-50/R

ERFURT BREIT

Schuhgröße	Art.-Nr. Paar	Art.-Nr. Linker Schuh	Art.-Nr. Rechter Schuh
35	TS5410-35	TS5410-35/L	TS5410-35/R
36	TS5410-36	TS5410-36/L	TS5410-36/R
37	TS5410-37	TS5410-37/L	TS5410-37/R
38	TS5410-38	TS5410-38/L	TS5410-38/R
39	TS5410-39	TS5410-39/L	TS5410-39/R
40	TS5410-40	TS5410-40/L	TS5410-40/R
41	TS5410-41	TS5410-41/L	TS5410-41/R
42	TS5410-42	TS5410-42/L	TS5410-42/R
43	TS5410-43	TS5410-43/L	TS5410-43/R
44	TS5410-44	TS5410-44/L	TS5410-44/R
45	TS5410-45	TS5410-45/L	TS5410-45/R
46	TS5410-46	TS5410-46/L	TS5410-46/R
47	TS5410-47	TS5410-47/L	TS5410-47/R
48	TS5410-48	TS5410-48/L	TS5410-48/R
49	TS5410-49	TS5410-49/L	TS5410-49/R
50	TS5410-50	TS5410-50/L	TS5410-50/R

PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

ERFURT eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Fußbereich/Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen), Schwellungen im Fußbereich (z. B. durch Entzündungen) oder Gelenkschmerzen im Fußbereich (z. B. durch Rheuma oder Arthrose) einen geschlossenen Schuh mit einer weit zu öffnenden Verschlusstechnik und hohem Schaft benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNGEN

Der asymmetrische Verbandsschuh ERFURT ist in den Weiten STANDARD und BREIT erhältlich.

SOHLENKONSTRUKTION

ERFURT verfügt über eine 30 mm dicke, rigide Sohle mit extra starker Rolle und Sprengung.


INNENSOHLEN

Im Schuh befinden sich drei 5 mm dicke EVA-Innensohlen (STANDARD F00053-XX und BREIT F00054-XX), von denen die obere Innensohle eine antimikrobielle Beschichtung aufweist.

BESONDERHEITEN

ERFURT bietet, insbesondere in der Variante BREIT, viel Raum für Verbände und besondere Platzanforderungen. Mithilfe des Fersenreißverschlusses kann der Schuh an- und ausgezogen werden, ohne den Spannlaschenverschluss öffnen zu müssen. Zudem verfügt der Schuh über eine integrierte Zehenkappe für mehr Stabilität und Schutz im Zehenbereich.

HMV-Nummern: ERFURT STANDARD 31.03.03.4029 ERFURT BREIT 31.03.03.4030

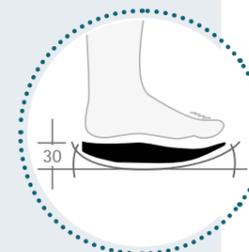



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

AUGSBURG eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Fußbereich/Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen), Schwellungen im Fußbereich (z. B. durch Entzündungen) oder Gelenkschmerzen im Fußbereich (z. B. durch Rheuma oder Arthrose) einen Schuh mit offenem Zehenbereich und hohem Schaft benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNGEN

Der asymmetrische Verbandsschuh AUGSBURG ist in den Weiten STANDARD und BREIT erhältlich.

SOHLENKONSTRUKTION

AUGSBURG verfügt über eine 30 mm dicke, rigide Sohle mit extra starker Rolle und Sprengung.


INNENSOHLEN

Im Schuh befinden sich drei 5 mm dicke EVA-Innensohlen (STANDARD F00053-XX und BREIT F00054-XX), von denen die obere Innensohle eine antimikrobielle Beschichtung aufweist.

BESONDERHEITEN

AUGSBURG bietet, insbesondere in der Variante BREIT, viel Raum für Verbände und besondere Platzanforderungen. Zudem kann am Zehenbereich bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden, die vor Nässe und Kälte schützt.

HMV-Nummern: AUGSBURG STANDARD 31.03.03.4xxx AUGSBURG BREIT 31.03.03.4xxx

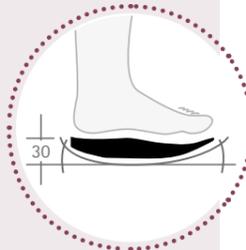

AUGSBURG STANDARD

Schuhgröße	Art.-Nr. Paar	Art.-Nr. Linker Schuh	Art.-Nr. Rechter Schuh
35	TS5381-35	TS5381-35/L	TS5381-35/R
36	TS5381-36	TS5381-36/L	TS5381-36/R
37	TS5381-37	TS5381-37/L	TS5381-37/R
38	TS5381-38	TS5381-38/L	TS5381-38/R
39	TS5381-39	TS5381-39/L	TS5381-39/R
40	TS5381-40	TS5381-40/L	TS5381-40/R
41	TS5381-41	TS5381-41/L	TS5381-41/R
42	TS5381-42	TS5381-42/L	TS5381-42/R
43	TS5381-43	TS5381-43/L	TS5381-43/R
44	TS5381-44	TS5381-44/L	TS5381-44/R
45	TS5381-45	TS5381-45/L	TS5381-45/R
46	TS5381-46	TS5381-46/L	TS5381-46/R
47	TS5381-47	TS5381-47/L	TS5381-47/R
48	TS5381-48	TS5381-48/L	TS5381-48/R
49	TS5381-49	TS5381-49/L	TS5381-49/R
50	TS5381-50	TS5381-50/L	TS5381-50/R

AUGSBURG BREIT

Schuhgröße	Art.-Nr. Paar	Art.-Nr. Linker Schuh	Art.-Nr. Rechter Schuh
35	TS5481-35	TS5481-35/L	TS5481-35/R
36	TS5481-36	TS5481-36/L	TS5481-36/R
37	TS5481-37	TS5481-37/L	TS5481-37/R
38	TS5481-38	TS5481-38/L	TS5481-38/R
39	TS5481-39	TS5481-39/L	TS5481-39/R
40	TS5481-40	TS5481-40/L	TS5481-40/R
41	TS5481-41	TS5481-41/L	TS5481-41/R
42	TS5481-42	TS5481-42/L	TS5481-42/R
43	TS5481-43	TS5481-43/L	TS5481-43/R
44	TS5481-44	TS5481-44/L	TS5481-44/R
45	TS5481-45	TS5481-45/L	TS5481-45/R
46	TS5481-46	TS5481-46/L	TS5481-46/R
47	TS5481-47	TS5481-47/L	TS5481-47/R
48	TS5481-48	TS5481-48/L	TS5481-48/R
49	TS5481-49	TS5481-49/L	TS5481-49/R
50	TS5481-50	TS5481-50/L	TS5481-50/R



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

BREMEN eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Fußbereich/Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen), Schwellungen im Fußbereich (z. B. durch Entzündungen) oder postoperativ nach sonstigen Verletzungen einen geschlossenen Schuh mit einer großzügigen Verschlusstechnik benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Verbandsschuh BREMEN ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

BREMEN verfügt über eine 30 mm dicke, rigide Sohle mit extra starker Rolle und Sprengung.


INNENSOHLEN

Im Schuh befindet sich eine EVA-Innensohle (F00064-XX), die antimikrobiell beschichtet ist.

BESONDERHEITEN

BREMEN bietet viel Raum für Verbände unterschiedlicher Dicke und kann mithilfe des großzügigen Spannlaschenverschlusses komfortabel an- und ausgezogen werden. Zudem verfügt der Schuh über eine integrierte Zehenkappe für mehr Stabilität und Schutz im Zehenbereich.

HMV-Nummer: 31.03.03.4033

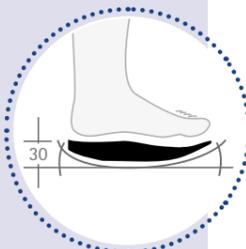

PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

TOKIO eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Fußbereich/Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen), Schwellungen im Fußbereich (z. B. durch Entzündungen) oder postoperativ nach sonstigen Verletzungen einen geschlossenen Schuh mit einer großzügigen Verschlusstechnik benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Verbandsschuh TOKIO ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

TOKIO verfügt über eine 30 mm dicke, rigide Sohle mit extra starker Rolle und Sprengung.


INNENSOHLEN

Der Schuh wird mit einer einfachen, 10 mm dicken Innensohle aus EVA-Material ausgeliefert.

BESONDERHEITEN

TOKIO bietet viel Raum für Verbände unterschiedlicher Dicke und kann mithilfe des großzügigen Spannlaschenverschlusses komfortabel an- und ausgezogen werden. Zudem verfügt der Schuh über eine integrierte Zehenkappe für mehr Stabilität und Schutz im Zehenbereich.

HMV-Nummer: 31.03.03.4039

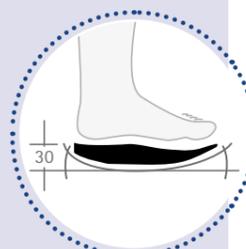

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück		
	a	c			a	c			
XXS	32-33	89	209	TS1151-XXS	L	40-41	106	268	TS1151-L
XS	34-35	92	230	TS1151-XS	XL	42-43	109	285	TS1151-XL
S	36-37	100	236	TS1151-S	XXL	44-46	110	301	TS1151-XXL
M	38-39	102	254	TS1151-M					

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück		
	a	c			a	c			
XXS	33-34	86	228	TS1150-XXS	L	41-42	102	276	TS1150-L
XS	35-36	92	239	TS1150-XS	XL	43-44	105	283	TS1150-XL
S	37-38	94	252	TS1150-S	XXL	45-47	111	309	TS1150-XXL
M	39-40	99	270	TS1150-M					



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

STUTTGART eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Fußbereich/Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen), Schwellungen im Fußbereich (z. B. durch Entzündungen) oder postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich (z. B. Hallux valgus, Hammer- oder Krallenzehen) oder sonstigen Verletzungen einen im Zehenbereich offenen Schuh benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Verbandsschuh STUTTGART ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

STUTTGART verfügt über eine 30 mm dicke, rigide Sohle mit extra starker Rolle und Sprengung.

INNENSOHLEN

Im Schuh befindet sich eine EVA-Innensohle (F00063-XX), die antimikrobiell beschichtet ist.

BESONDERHEITEN

STUTTGART bietet einen offenen Zehenbereich und kann mithilfe der drei langen Klettverschlüsse an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden.

HMV-Nummer: 31.03.03.4031



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

MADRID eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Fußbereich/Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen), Schwellungen im Fußbereich (z. B. durch Entzündungen) oder postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich (z. B. Hallux valgus, Hammer- oder Krallenzehen) oder sonstigen Verletzungen einen im Zehenbereich offenen Schuh benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Verbandsschuh MADRID ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

MADRID verfügt über eine 30 mm dicke, rigide Sohle mit extra starker Rolle und Sprengung.


INNENSOHLEN

Der Schuh wird mit einer einfachen, 10 mm dicken Innensohle aus EVA-Material ausgeliefert.

BESONDERHEITEN

MADRID bietet einen offenen Zehenbereich und kann mithilfe der zwei langen Klettverschlüsse an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden.

HMV-Nummer: 31.03.03.3035

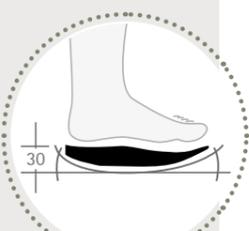

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück
	a	c			a	c	
XXS 33-34	85	226	TS1111-XXS	L 41-42	104	285	TS1111-L
XS 35-36	91	241	TS1111-XS	XL 43-44	105	301	TS1111-XL
S 37-38	98	258	TS1111-S	XXL 45-47	112	318	TS1111-XXL
M 39-40	101	273	TS1111-M				

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück
	a	c			a	c	
XXS 33-34	87	230	TS1000-XXS	L 41-42	104	286	TS1000-L
XS 35-36	90	243	TS1000-XS	XL 43-44	108	301	TS1000-XL
S 37-38	97	257	TS1000-S	XXL 45-47	112	316	TS1000-XXL
M 39-40	100	273	TS1000-M				



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

AMSTERDAM eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Fußbereich/Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen), Schwellungen im Fußbereich (z. B. durch Entzündungen) oder postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich (z. B. Hallux valgus, Hammer- oder Krallenzehe) oder sonstigen Verletzungen einen im Zehenbereich offenen Schuh mit hohem Schaft benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Verbandsschuh AMSTERDAM ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden. AMSTERDAM ist auch in einer KIDS-Version erhältlich.

SOHLENKONSTRUKTION

AMSTERDAM verfügt über eine 30 mm dicke, rigide Sohle mit gerader Oberseite und Rolle.

INNENSOHLEN

Der Schuh wird mit einer einfachen, 10 mm dicken Innensohle aus EVA-Material ausgeliefert.

BESONDERHEITEN


AMSTERDAM bietet einen offenen Zehenbereich mit Riemen, an dem bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fersebereich kann die Schaftweite angepasst werden. Außerdem ist AMSTERDAM ein geeigneter **TwinShoe** und somit Höhenausgleich für die Entlastungsschuhe LONDON und MAILAND.

HMV-Nummer: 31.03.03.4037

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück
	a	c			a	c	
XSK	31-33	86	221	L	40-42	98	280
XS	31-33	86	220	XL	43-45	106	302
S	34-36	92	216	XXL	46-48	116	320
M	37-39	96	261				

KIDS

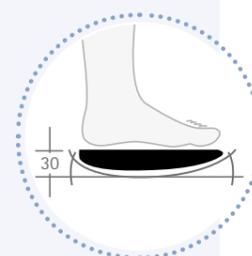

PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

FREIBURG eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Fußbereich/Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen), Schwellungen im Fußbereich (z. B. durch Entzündungen) oder postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich (z. B. Hallux valgus, Hammer- oder Krallenzehe) oder sonstigen Verletzungen einen im Zehenbereich offenen Schuh mit hohem Schaft benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Verbandsschuh FREIBURG ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden. FREIBURG ist auch in einer KIDS-Version erhältlich.

SOHLENKONSTRUKTION

FREIBURG verfügt über eine 30 mm dicke, rigide Sohle mit gerader Oberseite und Rolle.

INNENSOHLEN

Im Schuh befindet sich eine EVA-Innensohle (F00060-XX), die antimikrobiell beschichtet ist.

BESONDERHEITEN


FREIBURG bietet einen offenen Zehenbereich mit Riemen, an dem bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fersebereich kann die Schaftweite angepasst werden. Außerdem ist FREIBURG ein geeigneter **TwinShoe** und somit Höhenausgleich für die Entlastungsschuhe MAINZ und HANNOVER.

HMV-Nummer: 31.03.03.4015

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück
	a	c			a	c	
XSK	31-33	83	223	L	40-42	98	285
XS	31-33	83	223	XL	43-45	100	301
S	34-36	93	244	XXL	46-48	116	323
M	37-39	95	262				

KIDS

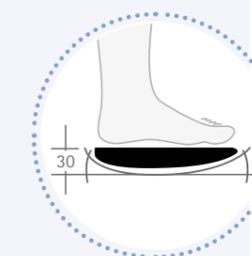



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

OSLO eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Fußbereich/Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen), Schwellungen im Fußbereich (z. B. durch Entzündungen) oder postoperativ nach sonstigen Verletzungen einen im Vorfußbereich offenen Schuh mit hohem Schaft benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Verbandsschuh OSLO ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

OSLO verfügt über eine 30 mm dicke, rigide Sohle mit gerader Oberseite und Rolle.

INNENSOHLEN

Der Schuh wird mit einer einfachen, 10 mm dicken Innensohle aus EVA-Material ausgeliefert.

BESONDERHEITEN

OSLO bietet einen offenen Vorfußbereich mit niedriger Umlaufkante, an der bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fersenbereich kann die Schaftweite angepasst werden. Außerdem ist OSLO ein geeigneter **TwinShoe** und somit Höhenausgleich für den Entlastungsschuh STOCKHOLM.

HMV-Nummer: 31.03.03.4038



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

HAMBURG eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Fußbereich/Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen), Schwellungen im Fußbereich (z. B. durch Entzündungen) oder postoperativ nach sonstigen Verletzungen einen im Vorfußbereich offenen Schuh mit hohem Schaft benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Verbandsschuh HAMBURG ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

HAMBURG verfügt über eine 30 mm dicke, rigide Sohle mit gerader Oberseite und Rolle.

INNENSOHLEN

Im Schuh befindet sich eine EVA-Innensohle (F00062-XX), die antimikrobiell beschichtet ist.

BESONDERHEITEN

HAMBURG bietet einen offenen Vorfußbereich mit niedriger Umlaufkante, an der bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fersenbereich kann die Schaftweite angepasst werden. Außerdem ist HAMBURG ein geeigneter **TwinShoe** und somit Höhenausgleich für den Entlastungsschuh KÖLN.

HMV-Nummer: 31.03.03.4013



BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück		
	a	c			a	c			
XS	30-32	79	215	TS6120-XS	L	39-41	99	274	TS6120-L
S	33-35	93	235	TS6120-S	XL	42-44	103	300	TS6120-XL
M	36-38	97	257	TS6120-M	XXL	45-47	116	320	TS6120-XXL

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück		
	a	c			a	c			
XS	30-32	88	216	TS6121-XS	L	39-41	98	281	TS6121-L
S	33-35	92	237	TS6121-S	XL	42-44	104	297	TS6121-XL
M	36-38	96	262	TS6121-M	XXL	45-47	118	322	TS6121-XXL



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

REGENSBURG eignet sich besonders für Patienten, die postoperativ nach einer Sprunggelenksfraktur einen individuell anpassbaren Schuh mit hohem Schaft benötigen, der für einen Fixateur externe geeignet ist.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Verbandsschuh REGENSBURG ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

REGENSBURG verfügt über eine 30 mm dicke Sohle mit gerader Oberseite und Rolle.

INNENSOHLEN

Im Schuh befindet sich eine EVA-Innensohle (F00060-XX), die antimikrobiell beschichtet ist.

BESONDERHEITEN

REGENSBURG bietet im Knöchelbereich zusätzliche Nähte, wodurch das Material an diesen Stellen sauber zugeschnitten werden kann, um bei Bedarf (z. B. für einen Fixateur externe) noch mehr Freiraum zu schaffen.

HMV-Nummer: 31.03.03.4035



BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück		
	a	c			a	c			
XS	31-33	82	219	TS6141-XS	L	40-42	94	275	TS6141-L
S	34-36	92	240	TS6141-S	XL	43-45	98	290	TS6141-XL
M	37-39	94	252	TS6141-M	XXL	46-48	115	315	TS6141-XXL

PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

ROSTOCK eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Rückfußbereich an der Ferse (z. B. durch traumatische Verletzungen) einen im Rückfußbereich offenen Schuh mit hohem Schaft benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Verbandsschuh ROSTOCK ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

ROSTOCK verfügt über eine 30 mm dicke Sohle mit gerader Oberseite und Rolle.


INNENSOHLEN

Im Schuh befindet sich eine EVA-Innensohle (F00069-XX), die antimikrobiell beschichtet ist.

BESONDERHEITEN

ROSTOCK bietet einen offenen Vorfußbereich mit niedriger Umlaufkante, an der bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt.

HMV-Nummer: 31.03.03.4034

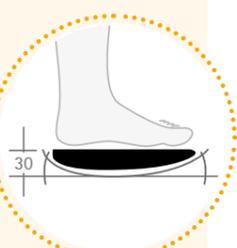

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück		
	a	c			a	c			
XS	30-32	85	220	TS6131-XS	L	39-41	90	272	TS6131-L
S	33-35	86	238	TS6131-S	XL	42-44	97	293	TS6131-XL
M	36-38	90	256	TS6131-M	XXL	45-47	112	311	TS6131-XXL



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

KOPENHAGEN eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich (z. B. Hallux valgus, Hammer- oder Krallenzehen) oder sonstigen Verletzungen einen im Zehenbereich offenen Schuh mit hohem Schaft und dicker Sohle benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Vorfußentlastungsschuh KOPENHAGEN ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

KOPENHAGEN verfügt über eine 40 mm dicke, rigide Sohle mit gerader Oberseite und extra starker Rolle.


INNENSOHLEN

Der Schuh wird mit einer einfachen, 10 mm dicken Innensohle aus EVA-Material ausgeliefert.

BESONDERHEITEN

KOPENHAGEN bietet einen offenen Zehenbereich mit Riemen, an dem bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fersenbereich kann die Schaftweite angepasst werden.

HMV-Nummer: 31.03.03.5xxx

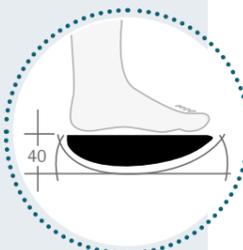

PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

FRANKFURT eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich (z. B. Hallux valgus, Hammer- oder Krallenzehen) oder sonstigen Verletzungen einen im Zehenbereich offenen Schuh mit hohem Schaft und dicker Sohle benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Vorfußentlastungsschuh FRANKFURT ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

FRANKFURT verfügt über eine 40 mm dicke, rigide Sohle mit gerader Oberseite und extra starker Rolle.


INNENSOHLEN

Im Schuh befindet sich eine EVA-Innensohle (F00060-XX), die antimikrobiell beschichtet ist.

BESONDERHEITEN

FRANKFURT bietet einen offenen Zehenbereich mit Riemen, an dem bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fersenbereich kann die Schaftweite angepasst werden.

HMV-Nummer: 31.03.03.5045

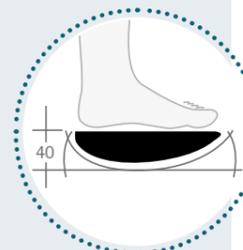

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück
	a	c			a	c	
XS	31-33	84	224	L	40-42	100	280
S	34-36	91	239	XL	43-45	109	303
M	37-39	94	258	XXL	46-48	116	319

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück
	a	c			a	c	
XS	31-33	85	222	L	40-42	98	283
S	34-36	92	240	XL	43-45	101	296
M	37-39	96	260	XXL	46-48	119	320



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

HELSINKI eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach sonstigen Verletzungen einen im Vorfußbereich offenen Schuh mit hohem Schaft und dicker Sohle benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Vorfußentlastungsschuh HELSINKI ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

HELSINKI verfügt über eine 40 mm dicke, rigide Sohle mit gerader Oberseite und extra starker Rolle.



INNENSOHLEN

Der Schuh wird mit einer einfachen, 10 mm dicken Innensohle aus EVA-Material ausgeliefert.

BESONDERHEITEN

HELSINKI bietet einen offenen Vorfußbereich mit niedriger Umlaufkante, an der bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt.

HMV-Nummer: 31.03.03.5xxx

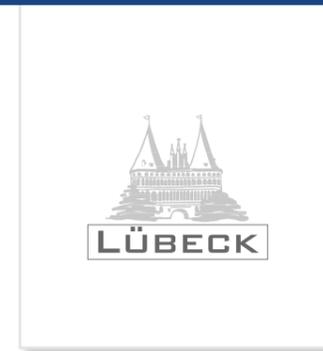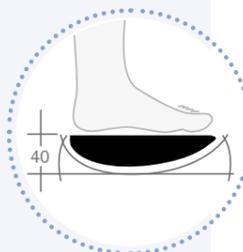

PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

LÜBECK eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach sonstigen Verletzungen einen im Vorfußbereich offenen Schuh mit hohem Schaft und dicker Sohle benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Vorfußentlastungsschuh LÜBECK ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

LÜBECK verfügt über eine 40 mm dicke, rigide Sohle mit gerader Oberseite und extra starker Rolle.


INNENSOHLEN

Im Schuh befindet sich eine EVA-Innensohle (F00062-XX), die antimikrobiell beschichtet ist.

BESONDERHEITEN

LÜBECK bietet einen offenen Vorfußbereich mit niedriger Umlaufkante, an der bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt.

HMV-Nummer: 31.03.03.5046

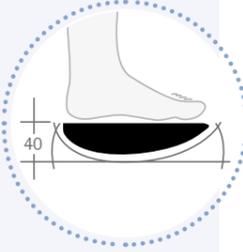

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück		
	a	c			a	c			
XS	30-32	88	212	F07120-XS	L	39-41	95	269	F07120-L
S	33-35	92	230	F07120-S	XL	42-44	106	288	F07120-XL
M	36-38	93	249	F07120-M	XXL	45-47	115	309	F07120-XXL

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück		
	a	c			a	c			
XS	30-32	86	215	F07121-XS	L	39-41	99	277	F07121-L
S	33-35	93	240	F07121-S	XL	42-44	102	299	F07121-XL
M	36-38	95	260	F07121-M	XXL	45-47	114	319	F07121-XXL



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

LONDON eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich (z. B. Hallux valgus, Hammer- oder Krallenzehe) oder sonstigen Verletzungen einen im Zehenbereich offenen Schuh mit hohem Schaft benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Vorfußentlastungsschuh LONDON ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

LONDON verfügt über eine 30 mm dicke, rigide 8° Keilsohle (60:40) mit Vorfußrolle. Durch die Keilsohle wird das Abrollen des Fußes verändert und der plantare Druck im Vorfußbereich stark gemindert.


INNENSOHLEN

Der Schuh wird mit einer einfachen, 10 mm dicken Innensohle aus EVA-Material ausgeliefert.

BESONDERHEITEN

LONDON bietet einen offenen Zehenbereich mit Riemen, an dem bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fersenbereich kann die Schaftweite angepasst werden. Außerdem kann AMSTERDAM als **TwinShoe** und somit Höhenausgleich zum LONDON getragen werden.

HMV-Nummer: 31.03.03.5xxx

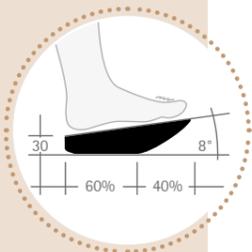

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück
	a	c			a	c	
XS 31-33	88	224	F01600-XS	L 40-42	99	279	F01600-L
S 34-36	92	239	F01600-S	XL 43-45	105	303	F01600-XL
M 37-39	94	261	F01600-M	XXL 46-48	116	323	F01600-XXL

PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

MAINZ eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich (z. B. Hallux valgus, Hammer- oder Krallenzehe) oder sonstigen Verletzungen einen im Zehenbereich offenen Schuh mit hohem Schaft benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Vorfußentlastungsschuh MAINZ ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

MAINZ verfügt über eine 30 mm dicke, rigide 8° Keilsohle (60:40) mit Vorfußrolle. Durch die Keilsohle wird das Abrollen des Fußes verändert und der plantare Druck im Vorfußbereich stark gemindert.


INNENSOHLEN

Im Schuh befindet sich eine EVA-Innensohle (F00060-XX), die antimikrobiell beschichtet ist.

BESONDERHEITEN

MAINZ bietet einen offenen Zehenbereich mit Riemen, an dem bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fersenbereich kann die Schaftweite angepasst werden. Außerdem kann FREIBURG als **TwinShoe** und somit Höhenausgleich zum MAINZ getragen werden.

HMV-Nummer: 31.03.03.5xxx

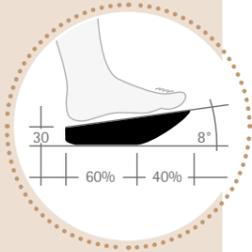

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück
	a	c			a	c	
XS 31-33	84	222	F01601-XS	L 40-42	97	285	F01601-L
S 34-36	93	245	F01601-S	XL 43-45	103	303	F01601-XL
M 37-39	95	265	F01601-M	XXL 46-48	114	325	F01601-XXL



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

HANNOVER eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich (z. B. Hallux valgus, Hammer- oder Krallenzehen) oder sonstigen Verletzungen einen im Zehenbereich offenen Schuh mit hohem Schaft und Vorfußunterstützung benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Vorfußentlastungsschuh HANNOVER ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden. HANNOVER ist auch in einer KIDS-Version erhältlich.

SOHLENKONSTRUKTION

HANNOVER verfügt über eine 30 mm dicke, rigide 8° Keilsohle (60:40) mit Vorfußunterstützung, die das Abrollen des Fußes verändert und den Vorfuß entlastet. Wird die Sohle beschliffen, kann die Abrolllinie verlagert werden.

INNENSOHLEN


Im Schuh befindet sich eine EVA-Innensohle (F00060-XX), die antimikrobiell beschichtet ist.

BESONDERHEITEN

HANNOVER bietet einen offenen Zehenbereich mit Riemen, an dem bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fersebereich kann die Schaftweite angepasst werden. Außerdem kann FREIBURG als **TwinShoe** und somit Höhenausgleich zum HANNOVER getragen werden.

HMV-Nummer: 31.03.03.5019

KIDS

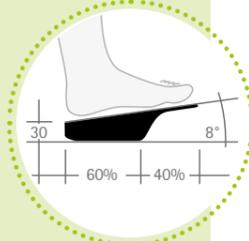

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück		
	a	c			a	c			
XSK	31-33	86	221	F01101-XSK	L	40-42	96	282	F01101-L
XS	31-33	83	222	F01101-XS	XL	43-45	100	298	F01101-XL
S	34-36	92	245	F01101-S	XXL	46-48	113	325	F01101-XXL
M	37-39	94	261	F01101-M					



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

MAILAND eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich (z. B. Hallux valgus, Hammer- oder Krallenzehen) oder sonstigen Verletzungen einen im Zehenbereich offenen Schuh mit hohem Schaft und Vorfußunterstützung benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Vorfußentlastungsschuh MAILAND ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden. MAILAND ist auch in einer KIDS-Version erhältlich.

SOHLENKONSTRUKTION

MAILAND verfügt über eine 30 mm dicke, rigide 8° Keilsohle (60:40) mit Vorfußunterstützung, die das Abrollen des Fußes verändert und den Vorfuß entlastet. Wird die Sohle beschliffen, kann die Abrolllinie verlagert werden.

INNENSOHLEN


Der Schuh wird mit einer einfachen, 10 mm dicken Innensohle aus EVA-Material ausgeliefert.

BESONDERHEITEN

MAILAND bietet einen offenen Zehenbereich mit Riemen, an dem bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fersebereich kann die Schaftweite angepasst werden. Außerdem kann AMSTERDAM als **TwinShoe** und somit Höhenausgleich zum MAILAND getragen werden.

HMV-Nummer: 31.03.03.5043

KIDS

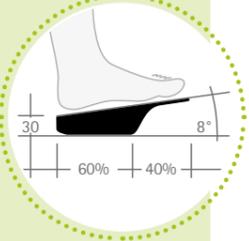

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück		
	a	c			a	c			
XSK	31-33	88	224	F01100-XSK	L	40-42	100	281	F01100-L
XS	31-33	89	223	F01100-XS	XL	43-45	104	304	F01100-XL
S	34-36	90	242	F01100-S	XXL	46-48	119	323	F01100-XXL
M	37-39	92	261	F01100-M					



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

KÖLN eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder (postoperativ) nach sonstigen Verletzungen einen im Vorfußbereich offenen Schuh mit hohem Schaft und Vorfußunterstützung benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Vorfußentlastungsschuh KÖLN ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

KÖLN verfügt über eine 30 mm dicke, rigide 8° Keilsohle (60:40) mit Vorfußunterstützung, die das Abrollen des Fußes verändert und den Vorfuß entlastet. Wird die Sohle beschliffen, kann die Abrolllinie verlagert werden.


INNENSOHLEN

Im Schuh befindet sich eine EVA-Innensohle (F00062-XX), die antimikrobiell beschichtet ist.

BESONDERHEITEN

KÖLN bietet einen offenen Vorfußbereich mit niedriger Umlaufkante, an der bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fersenbereich kann die Schaftweite angepasst werden. Außerdem kann HAMBURG als **TwinShoe** und somit Höhenausgleich zum KÖLN getragen werden.

HMV-Nummer: 31.03.03.5020

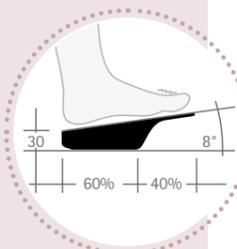

PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

STOCKHOLM eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder (postoperativ) nach sonstigen Verletzungen einen im Vorfußbereich offenen Schuh mit hohem Schaft und Vorfußunterstützung benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Vorfußentlastungsschuh STOCKHOLM ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

STOCKHOLM verfügt über eine 30 mm dicke, rigide 8° Keilsohle (60:40) mit Vorfußunterstützung, die das Abrollen des Fußes verändert und den Vorfuß entlastet. Wird die Sohle beschliffen, kann die Abrolllinie verlagert werden.


INNENSOHLEN

Der Schuh wird mit einer einfachen, 10 mm dicken Innensohle aus EVA-Material ausgeliefert.

BESONDERHEITEN

STOCKHOLM bietet einen offenen Vorfußbereich mit niedriger Umlaufkante, an der bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fersenbereich kann die Schaftweite angepasst werden. Außerdem kann OSLO als **TwinShoe** und somit Höhenausgleich zum STOCKHOLM getragen werden.

HMV-Nummer: 31.03.03.5050

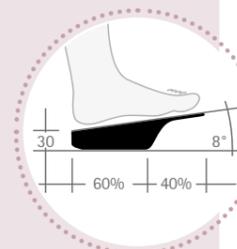

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück		
	a	c			a	c			
XS	30-32	82	219	F01121-XS	L	39-41	94	275	F01121-L
S	33-35	92	240	F01121-S	XL	42-44	98	290	F01121-XL
M	36-38	94	252	F01121-M	XXL	45-47	115	315	F01121-XXL

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück		
	a	c			a	c			
XS	30-32	85	220	F01120-XS	L	39-41	90	272	F01120-L
S	33-35	86	238	F01120-S	XL	42-44	97	293	F01120-XL
M	36-38	90	256	F01120-M	XXL	45-47	112	311	F01120-XXL



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

STENDAL eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich (z. B. Hallux valgus, Hammer- oder Krallenzehen) oder sonstigen Verletzungen einen im Zehenbereich offenen Schuh mit hohem Schaft und Vorfußunterstützung benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Vorfußentlastungsschuh STENDAL ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

STENDAL verfügt über eine 30 mm dicke, rigide 10° Keilsohle (50:50) mit Vorfußunterstützung, die das Abrollen des Fußes verändert und den Vorfuß entlastet. Wird die Sohle beschliffen, kann die Abrolllinie verlagert werden.


INNENSOHLEN

Der Schuh wird mit einer einfachen, 10 mm dicken Innensohle aus EVA-Material ausgeliefert.

BESONDERHEITEN

STENDAL bietet einen offenen Zehenbereich mit Riemen, an dem bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fersenbereich kann die Schaftweite angepasst werden.

HMV-Nummer: 31.03.03.5xxx

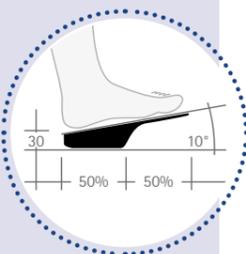

BESTELLINFORMATIONEN

	Schuhgröße		Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück		Schuhgröße		Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück
			a	c					a	c	
XS	31-33		88	221	F01160-XS	L	40-42	99	282	F01160-L	
S	34-36		92	241	F01160-S	XL	43-45	107	305	F01160-XL	
M	37-39		97	261	F01160-M	XXL	46-48	118	324	F01160-XXL	



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

LÜNEBURG eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich (z. B. Hallux valgus, Hammer- oder Krallenzehe) oder sonstigen Verletzungen einen im Zehenbereich offenen Schuh mit hohem Schaft, dicker Sohle und Vorfußunterstützung benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Vorfußentlastungsschuh LÜNEBURG ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

LÜNEBURG verfügt über eine 40 mm dicke, rigide 10° Keilsohle (50:50) mit Vorfußunterstützung, die das Abrollen des Fußes verändert und den Vorfuß entlastet.


INNENSOHLEN

Im Schuh befindet sich eine EVA-Innensohle (F00068-XX), die antimikrobiell beschichtet ist.

BESONDERHEITEN

LÜNEBURG bietet einen offenen Zehenbereich mit Riemen, an dem bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fernbereich kann die Schaftweite angepasst werden.

HMV-Nummer: 31.03.03.5044

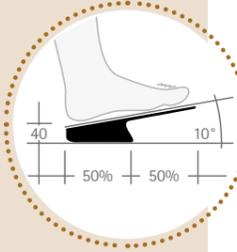

BESTELLINFORMATIONEN

	Schuhgröße		Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße		Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück
	a	c	a	c		a	c			
S	31-33	84	219		F01201-S	XL	41-44	102	288	F01201-XL
M	34-37	98	249		F01201-M	XXL	45-49	117	326	F01201-XXL
L	38-40	99	266		F01201-L					





PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

BERLIN eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach Vorfuß(tail)amputationen/sonstigen Verletzungen im Vorfußbereich einen Schuh mit verkürzter, dicker Sohle mit hohem Schaft ohne Vorfußunterstützung benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Vorfußentlastungsschuh BERLIN ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

BERLIN verfügt über eine 40 mm dicke, rigide 10° Keilsohle (50:50) ohne Vorfußunterstützung. Durch die verkürzte Sohle wird das Abrollen des Fußes verändert und der Vorfußbereich vollständig entlastet.


INNENSOHLEN

Im Schuh befindet sich eine EVA-Innensohle (F00011-XX) mit weicher Oberfläche.

BESONDERHEITEN

BERLIN bietet eine verkürzte Keilsohle und sorgt so für eine vollständige Druckentlastung des Vorfußbereiches. Bei Bedarf kann an der Innensohle eine Vorfußschutzkappe angebracht werden, die vor Nässe und Kälte schützt. Zudem lässt sich BERLIN nachträglich mit einem Schutzbügel (F01000-Z5,-Z6,-Z7,-Z8) aufrüsten.

HMV-Nummer: 31.03.03.5xxx

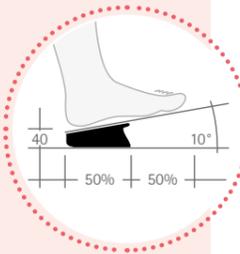

PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

BERLIN mit Schutzbügel eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach Vorfuß(tail)amputationen/sonstigen Verletzungen im Vorfußbereich einen Schuh mit verkürzter, dicker Sohle mit hohem Schaft ohne Vorfußunterstützung, jedoch mit zusätzlichem Stoßschutz benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Vorfußentlastungsschuh BERLIN mit Schutzbügel ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

BERLIN mit Schutzbügel verfügt über eine 40 mm dicke, rigide 10° Keilsohle (50:50) ohne Vorfußunterstützung. Durch die verkürzte Sohle wird das Abrollen des Fußes verändert und der Vorfußbereich vollständig entlastet.


INNENSOHLEN

Im Schuh befindet sich eine EVA-Innensohle (F00011-XX) mit weicher Oberfläche.

BESONDERHEITEN

BERLIN mit Schutzbügel bietet zusätzlichen Schutz vor Verletzungen (z. B. Stößen). Der Schutzbügel ist sowohl längenverstellbar als auch thermoplastisch verformbar und kann somit individuell angepasst werden. Bei Bedarf kann an der Innensohle eine Vorfußschutzkappe angebracht werden, die vor Nässe und Kälte schützt.

HMV-Nummer: 31.03.03.5xxx

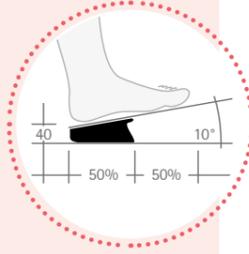

BERLIN

Schuhgröße	Schuhinnenmaß c	Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaß c	Art.-Nr. Stück
S 36-38	164	F01002-S	L 43-46	191	F01002-L
M 39-42	172	F01002-M	XL 47-51	195	F01002-XL

BERLIN mit Schutzbügel

Schuhgröße	Schuhinnenmaß c	Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaß c	Art.-Nr. Stück
S 36-38	164	F01012-S	L 43-46	191	F01012-L
M 39-42	172	F01012-M	XL 47-51	195	F01012-XL



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

BORDEAUX eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach Vorfußamputationen/sonstigen Verletzungen im Vorfußbereich einen Schuh mit verkürzter, dicker Sohle ohne Vorfußunterstützung benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Vorfußentlastungsschuh BORDEAUX ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

BORDEAUX verfügt über eine 40 mm dicke, rigide 10° Keilsohle (50:50) ohne Vorfußunterstützung. Durch die verkürzte Sohle wird das Abrollen des Fußes verändert und der Vorfußbereich vollständig entlastet.


INNENSOHLEN

Der Schuh wird mit einer einfachen, 10 mm dicken Innensohle aus EVA-Material ausgeliefert.

BESONDERHEITEN

BORDEAUX bietet eine verkürzte Keilsohle und sorgt so für eine vollständige Druckentlastung des Vorfußbereiches. Bei Bedarf kann an der Innensohle eine Vorfußschutzkappe angebracht werden, die vor Nässe und Kälte schützt. Zudem lässt sich BORDEAUX nachträglich mit einem Schutzbügel (F01000-Z9,-Z10,-Z11,-Z12) aufrüsten.

HMV-Nummer: 31.03.03.5xxx

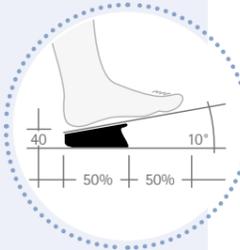

BORDEAUX

Schuhgröße	Schuhinnenmaß c	Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaß c	Art.-Nr. Stück
S 35-37	159	F01001-S	L 41-43	180	F01001-L
M 38-40	170	F01001-M	XL 44-46	188	F01001-XL



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

BORDEAUX mit Schutzbügel eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach Vorfußamputationen/sonstigen Verletzungen im Vorfußbereich einen Schuh mit verkürzter, dicker Sohle ohne Vorfußunterstützung, jedoch mit zusätzlichem Stoßschutz benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Vorfußentlastungsschuh BORDEAUX mit Schutzbügel ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

BORDEAUX mit Schutzbügel verfügt über eine 40 mm dicke, rigide 10° Keilsohle (50:50) ohne Vorfußunterstützung. Durch die verkürzte Sohle wird das Abrollen des Fußes verändert und der Vorfußbereich vollständig entlastet.


INNENSOHLEN

Der Schuh wird mit einer einfachen, 10 mm dicken Innensohle aus EVA-Material ausgeliefert.

BESONDERHEITEN

BORDEAUX mit Schutzbügel bietet zusätzlichen Schutz vor Verletzungen (z. B. Stößen). Der Schutzbügel ist sowohl längenverstellbar als auch thermoplastisch verformbar und kann somit individuell angepasst werden. Bei Bedarf kann an der Innensohle eine Vorfußschutzkappe angebracht werden, die vor Nässe und Kälte schützt.

HMV-Nummer: 31.03.03.5xx

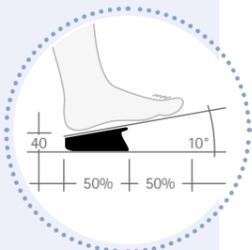

BORDEAUX mit Schutzbügel

Schuhgröße	Schuhinnenmaß c	Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaß c	Art.-Nr. Stück
S 35-37	159	F01011-S	L 41-43	180	F01011-L
M 38-40	170	F01011-M	XL 44-46	188	F01011-XL



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

KAISERSLAUTERN eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach Vorfußamputationen/sonstigen Verletzungen im Vorfußbereich einen Schuh mit stark verkürzter Sohle, hohem Schaft und ohne Vorfußunterstützung benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Vorfußentlastungsschuh KAISERSLAUTERN ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

KAISERSLAUTERN verfügt über eine 30 mm dicke, rigide 10° Keilsohle (30:70) ohne Vorfußunterstützung. Durch die stark verkürzte Sohle wird das Abrollen des Fußes verändert und der Vorfußbereich vollständig entlastet.


INNENSOHLEN

Im Schuh befindet sich eine EVA-Innensohle (F00016-XX) mit weicher Oberfläche.

BESONDERHEITEN

KAISERSLAUTERN bietet eine stark verkürzte Keilsohle und sorgt so für eine vollständige Druckentlastung des Vorfußbereiches. Zudem lässt sich KAISERSLAUTERN nachträglich mit einem Schutzbügel (F01000-Z0,-Z1) aufrüsten.

HMV-Nummer: 31.03.03.5xxx

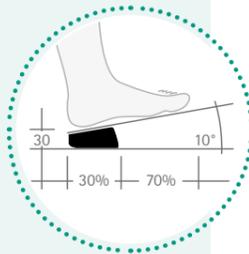

KAISERSLAUTERN

Schuhgröße	Schuhinnenmaß c	Art.-Nr. Stück
S 35-42	122	F01030-S
L 43-46	140	F01030-L



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

KAISERSLAUTERN mit Schutzbügel eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Vorfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach Vorfußamputationen/sonstigen Verletzungen im Vorfußbereich einen Schuh mit stark verkürzter Sohle, hohem Schaft, ohne Vorfußunterstützung, jedoch mit zusätzlichem Stoßschutz benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Vorfußentlastungsschuh KAISERSLAUTERN mit Schutzbügel ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

KAISERSLAUTERN mit Schutzbügel verfügt über eine 30 mm dicke, rigide 10° Keilsohle (30:70) ohne Vorfußunterstützung. Durch die stark verkürzte Sohle wird das Abrollen des Fußes verändert und der Vorfußbereich vollständig entlastet.


INNENSOHLEN

Im Schuh befindet sich eine EVA-Innensohle (F00016-XX) mit weicher Oberfläche.

BESONDERHEITEN

KAISERSLAUTERN mit Schutzbügel bietet zusätzlichen Schutz vor Verletzungen (z. B. Stößen). Der Schutzbügel ist sowohl längenverstellbar als auch thermoplastisch verformbar und kann somit individuell angepasst werden.

HMV-Nummer: 31.03.03.5xx

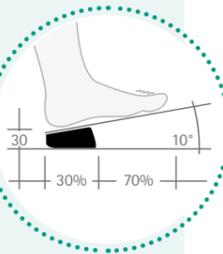

KAISERSLAUTERN mit Schutzbügel

Schuhgröße	Schuhinnenmaß c	Art.-Nr. Stück
S 35-42	122	F01031-S
L 43-46	140	F01031-L



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

MÜNCHEN eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Rückfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach sonstigen Verletzungen im Rückfußbereich (z. B. Fersensporn) einen Schuh mit verkürzter Sohle, hohem Schaft und ohne Rückfußunterstützung benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Rückfußentlastungsschuh MÜNCHEN ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

MÜNCHEN verfügt über eine 30 mm dicke, im Vorfußbereich teilflexible 5° Keilsohle (20:80) ohne Rückfußunterstützung. Durch die hinten verkürzte Sohle wird das Abrollen des Fußes verändert und der Rückfußbereich vollständig entlastet.


INNENSOHLEN

Im Schuh befindet sich eine EVA-Innensohle (F00020-XX) mit weicher Oberfläche.

BESONDERHEITEN

MÜNCHEN bietet einen offenen Vorfußbereich mit niedriger Umlaufkante, an der bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe, und einen offenen Rückfußbereich, an dem bei Bedarf eine Rückfußschutzkappe angebracht werden kann.

HMV-Nummer: 31.03.03.5021

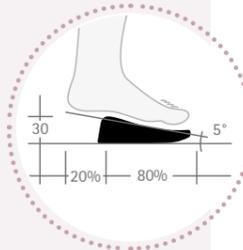

PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

MARSEILLE eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Rückfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach sonstigen Verletzungen im Rückfußbereich (z. B. Fersensporn) einen Schuh mit verkürzter Sohle, hohem Schaft und ohne Rückfußunterstützung benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Rückfußentlastungsschuh MARSEILLE ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

MARSEILLE verfügt über eine 30 mm dicke, im Vorfußbereich teilflexible 5° Keilsohle (20:80) ohne Rückfußunterstützung. Durch die hinten verkürzte Sohle wird das Abrollen des Fußes verändert und der Rückfußbereich vollständig entlastet.


INNENSOHLEN

Der Schuh wird mit einer einfachen Innensohle aus EVA-Material ausgeliefert.

BESONDERHEITEN

MARSEILLE bietet einen offenen Vorfußbereich mit niedriger Umlaufkante, an der bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe, und einen offenen Rückfußbereich, an dem bei Bedarf eine Rückfußschutzkappe angebracht werden kann.

HMV-Nummer: 31.03.03.5xxx

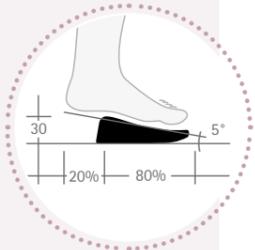

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück
	a	c			a	c	
S 35-37	90	249	F02121-S	L 41-42	103	287	F02121-L
M 38-40	100	257	F02121-M	XL 43-46	104	297	F02121-XL

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück
	a	c			a	c	
S 35-37	90	237	F02120-S	L 41-42	95	268	F02120-L
M 38-40	93	255	F02120-M	XL 43-46	102	288	F02120-XL



PRODUKTINFORMATIONEN

INDIKATIONEN

WUPPERTAL eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Wunden im Rückfußbereich an der Fußsohle (z. B. durch traumatische Verletzungen) oder postoperativ nach sonstigen Verletzungen im Rückfußbereich (z. B. Fersensporn) einen Schuh mit verkürzter Sohle, hohem Schaft und ohne Rückfußunterstützung benötigen.

SCHUHAUSFÜHRUNG

Der Rückfußentlastungsschuh WUPPERTAL ist symmetrisch und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

SOHLENKONSTRUKTION

WUPPERTAL verfügt über eine 30 mm dicke, im Vorfußbereich teilflexible 5° Keilsohle (20:80) ohne Rückfußunterstützung. Durch die hinten verkürzte Sohle wird das Abrollen des Fußes verändert und der Rückfußbereich vollständig entlastet.


INNENSOHLEN

Der Schuh wird mit einer einfachen Innensohle aus EVA-Material ausgeliefert.

BESONDERHEITEN

WUPPERTAL bietet einen offenen Zehen- und Fersenbereich und kann mithilfe der ungewöhnlichen Klettverschlüsse an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden.

HMV-Nummer: 31.03.03.5xxx

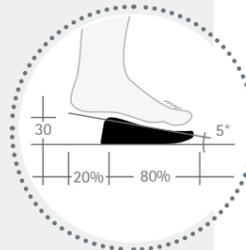

BESTELLINFORMATIONEN

Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück	Schuhgröße	Schuhinnenmaße		Art.-Nr. Stück
	a	c			a	c	
S 35-37	85	214	F02000-S	L 41-42	94	251	F02000-L
M 38-40	93	235	F02000-M	XL 43-46	98	265	F02000-XL

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir haben unsere Therapieschuhe auf Grundlage des Mondopoint-Systems vermessen. Anschließend wurden die Schuhgrößen mit Hilfe des Pariser Stiches neu berechnet.

Mondopoint-System

Das Mondopoint-System ist ein international genormtes System zur Angabe von Schuhgrößen. Der Unterschied zu anderen Systemen ist, dass nicht nur die Schuhinnenlänge, sondern auch die Schuhinnenbreite gemessen wird.

Pariser Stich

Zur Ermittlung der Schuhgrößen haben wir den Pariser Stich verwendet. Dieser wird wie folgt berechnet:

Schuhgröße = Schuhinnenlänge in cm x 1,5
Länge und Breite werden in mm angegeben.

ACHTUNG!

Wir geben in diesem Schuhkatalog Straßenschuhgrößen an. Ein Platzbedarf für eventuelle Verbände wurde nicht mit eingeplant.



ASYMMETRISCHE UND SYMMETRISCHE SCHUHE



Schuhinnenlänge

Die Schuhinnenlänge (c) wurde von der Fersenmitte zur Großzehenmitte mit einem Standardmessgerät gemessen.

Schuhinnenbreiten (Ballen- und Fersenbereich)

Die Schuhinnenbreiten wurden an der Innensohle gemessen.

Für die Schuhinnenbreite im Ballenbereich wurde von der Schuhspitze ausgehend bei 1/3 der Innensohle eine Querlinie gezogen. An dieser rechtwinkligen Geraden wurde ein 15° Winkel abgetragen. Die dabei entstandene Linie war unsere Messlinie für die Schuhinnenbreite im Ballenbereich (a). Die Schuhinnenbreite im Fersenbereich (b) wurde auf Höhe der Fersenmitte gemessen.

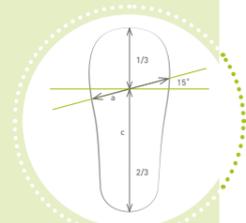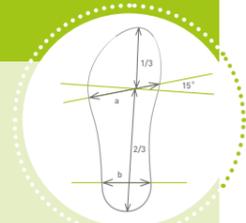

SCHUHINNENMASSE STANDARD (F00033 und F00053)

Schuhgröße	Schuhinnenmaße [mm]			Schuhgröße	Schuhinnenmaße [mm]		
	a	b	c		a	b	c
35	93	66	231	43	106	75	288
36	94	67	237	44	109	76	295
37	95	69	245	45	109	79	299
38	98	69	250	46	110	79	305
39	99	71	258	47	111	81	313
40	101	73	266	48	113	81	318
41	104	74	271	49	115	81	325
42	105	75	277	50	115	81	332

AUGSBURG STANDARD, ERFURT STANDARD, FLENSBURG STANDARD

SCHUHINNENMASSE BREIT (F00034 und F00054)

Schuhgröße	Schuhinnenmaße [mm]			Schuhgröße	Schuhinnenmaße [mm]		
	a	b	c		a	b	c
35	102	67	233	43	114	76	282
36	103	69	240	44	116	79	287
37	104	71	247	45	118	80	295
38	107	73	249	46	121	81	302
39	109	73	255	47	123	82	308
40	111	74	263	48	126	83	319
41	111	75	269	49	126	83	325
42	112	76	277	50	127	87	333

AUGSBURG BREIT, ERFURT BREIT, FLENSBURG BREIT



Die oberste Innensohle ist antimikrobiell. Die Innensohlen bestehen aus EVA-Material und bieten unterschiedliche Shore-Härten: grau = 46°, weiß = 23°, antimikrobiell = 28°

INNENSOHLENSATZ STANDARD

Schuhgröße	Art.-Nr. Satz	Schuhgröße	Art.-Nr. Satz
35	F00053-35	43	F00053-43
36	F00053-36	44	F00053-44
37	F00053-37	45	F00053-45
38	F00053-38	46	F00053-46
39	F00053-39	47	F00053-47
40	F00053-40	48	F00053-48
41	F00053-41	49	F00053-49
42	F00053-42	50	F00053-50

AUGSBURG STANDARD, ERFURT STANDARD, FLENSBURG STANDARD

INNENSOHLENSATZ BREIT

Schuhgröße	Art.-Nr. Satz	Schuhgröße	Art.-Nr. Satz
35	F00054-35	43	F00054-43
36	F00054-36	44	F00054-44
37	F00054-37	45	F00054-45
38	F00054-38	46	F00054-46
39	F00054-39	47	F00054-47
40	F00054-40	48	F00054-48
41	F00054-41	49	F00054-49
42	F00054-42	50	F00054-50

AUGSBURG BREIT, ERFURT BREIT, FLENSBURG BREIT

INNENSOHLENSATZ STANDARD

Schuhgröße	Art.-Nr. Satz	Schuhgröße	Art.-Nr. Satz
35	F00033-35	43	F00033-43
36	F00033-36	44	F00033-44
37	F00033-37	45	F00033-45
38	F00033-38	46	F00033-46
39	F00033-39	47	F00033-47
40	F00033-40	48	F00033-48
41	F00033-41	49	F00033-49
42	F00033-42	50	F00033-50

AUGSBURG STANDARD, ERFURT STANDARD, FLENSBURG STANDARD

INNENSOHLENSATZ BREIT

Schuhgröße	Art.-Nr. Satz	Schuhgröße	Art.-Nr. Satz
35	F00034-35	43	F00034-43
36	F00034-36	44	F00034-44
37	F00034-37	45	F00034-45
38	F00034-38	46	F00034-46
39	F00034-39	47	F00034-47
40	F00034-40	48	F00034-48
41	F00034-41	49	F00034-49
42	F00034-42	50	F00034-50

AUGSBURG BREIT, ERFURT BREIT, FLENSBURG BREIT



Die Innensohlen bestehen aus EVA-Material und bieten unterschiedliche Shore-Härten: schwarz = 40°, grau = 25°, weiß = 50°



Die Innensohlen bestehen aus EVA-Material. Der Bezug aus PA-Material ist antimikrobiell.

ANTIMIKROBIELLE INNENSOHLE

Größe	Art.-Nr.
XS	F00060-XS
S	F00060-S
M	F00060-M
L	F00060-L
XL	F00060-XL
XXL	F00060-XXL

AMSTERDAM, FRANKFURT, FREIBURG, HANNOVER, KOPENHAGEN, LONDON, MAILAND, MAINZ, REGENSBURG

ANTIMIKROBIELLE INNENSOHLE

Größe	Art.-Nr.
XS	F00063-XS
S	F00063-S
M	F00063-M
L	F00063-L
XL	F00063-XL
XXL	F00063-XXL

STUTTGART, MADRID

ANTIMIKROBIELLE INNENSOHLE

Größe	Art.-Nr.
S	F00068-S
M	F00068-M
L	F00068-L
XL	F00068-XL
XXL	F00068-XXL

STENDAL, LÜNEBURG

ANTIMIKROBIELLE INNENSOHLE

Größe	Art.-Nr.
XS	F00062-XS
S	F00062-S
M	F00062-M
L	F00062-L
XL	F00062-XL
XXL	F00062-XXL

HAMBURG, HELSINKI, KÖLN, LÜBECK, OSLO, STOCKHOLM

ANTIMIKROBIELLE INNENSOHLE

Größe	Art.-Nr.
XS	F00064-XS
S	F00064-S
M	F00064-M
L	F00064-L
XL	F00064-XL
XXL	F00064-XXL

BREMEN, TOKIO

ANTIMIKROBIELLE INNENSOHLE

Größe	Art.-Nr.
XS	F00069-XS
S	F00069-S
M	F00069-M
L	F00069-L
XL	F00069-XL
XXL	F00069-XXL

ROSTOCK



Die Innessohlen bestehen aus EVA-Material und einer Polsterung aus PA-Schaum. Der weiche Bezug besteht aus einer gewebten Kunststofffaser.

INNENSOHLE	
Größe	Art.-Nr.
S	F00011-S
M	F00011-M
L	F00011-L
XL	F00011-XL

BERLIN, BORDEAUX

INNENSOHLE	
Größe	Art.-Nr.
S	F00016-S
L	F00016-L

KAISERSLAUTERN

INNENSOHLE	
Größe	Art.-Nr.
S	F00020-S
M	F00020-M
L	F00020-L
XL	F00020-XL

MÜNCHEN, MARSEILLE



VORFUSSSCHUTZKAPPE (INNEN EINKLETTBAR)

Größe	Art.-Nr.
XS	F09621-XS
S	F09621-S
M	F09621-M
L	F09621-L
XL	F09621-XL
XXL	F09621-XXL

AMSTERDAM, KÖPENHAGEN, LONDON, MAILAND, STENDAL

Die Vorfußschutzkappe kann ganz einfach angebracht werden und schützt den Fuß vor Nässe und Kälte.



VORFUSSSCHUTZKAPPE	
Größe	Art.-Nr.
XS	F09121-XS
S	F09121-S
M	F09121-M
L	F09121-L
XL	F09121-XL
XXL	F09121-XXL

STOCKHOLM, OSLO, MARSEILLE, HELSINKI

Die Vorfußschutzkappe kann ganz einfach angebracht werden und schützt den Fuß vor Nässe und Kälte.



VORFUSSSCHUTZKAPPE (INNEN EINKLETTBAR)

Größe	Art.-Nr.
XS	F09100-XS
S	F09100-S
M	F09100-M
L	F09100-L
XL	F09100-XL
XXL	F09100-XXL

KÖLN, LÜBECK, HAMBURG, MÜNCHEN, ROSTOCK

Die Vorfußschutzkappe kann ganz einfach innen im Schuh angebracht werden und schützt den Fuß vor Nässe und Kälte.



VORFUSSSCHUTZKAPPE	
Größe	Art.-Nr.
S	F09401-S
M	F09401-M
L	F09401-L
XL	F09401-XL

Die Vorfußschutzkappe kann ganz einfach am BORDEAUX angebracht werden und schützt den Fuß vor Nässe und Kälte.



VORFUSSSCHUTZKAPPE (AUSSEN ANKLETTBAR)

Größe	Art.-Nr.
XS	F09110-XS
S	F09110-S
M	F09110-M
L	F09110-L
XL	F09110-XL
XXL	F09110-XXL

KÖLN, LÜBECK, HAMBURG, MÜNCHEN, ROSTOCK

Die Vorfußschutzkappe kann ganz einfach außen am Schuh angebracht werden und schützt den Fuß vor Nässe und Kälte.



VORFUSSSCHUTZKAPPE

Größe	Art.-Nr.
S	F09400-S
M	F09400-M
L	F09400-L
XL	F09400-XL

Die Vorfußschutzkappe kann ganz einfach am BERLIN angebracht werden und schützt den Fuß vor Nässe und Kälte.



RÜCKFUSSSCHUTZKAPPE

Größe	Art.-Nr.
S	F09301-S
M	F09301-M
L	F09301-L
XL	F09301-XL

Die Rückfußschutzkappe kann ganz einfach am MÜNCHEN angebracht werden und schützt den Fuß vor Nässe und Kälte.



VORFUSSSCHUTZKAPPE

Schuhgröße	Art.-Nr.
35-36	F09580-XXS
37-38	F09580-XS
39-40	F09580-S
41-42	F09580-M
43-44	F09580-L
45-46	F09580-XL
47-48	F09580-XXL
49-50	F09580-XXXL

Die Vorfußschutzkappe kann ganz einfach am AUGSBURG STANDARD und BREIT angebracht werden und schützt den Fuß vor Nässe und Kälte.



RÜCKFUSSSCHUTZKAPPE

Größe	Art.-Nr.
S	F09320-S
M	F09320-M
L	F09320-L
XL	F09320-XL

Die Rückfußschutzkappe kann ganz einfach am MARSEILLE angebracht werden und schützt den Fuß vor Nässe und Kälte.



VORFUSSSCHUTZKAPPE

Größe	Art.-Nr.
XS	F09620-XS
S	F09620-S
M	F09620-M
L	F09620-L
XL	F09620-XL
XXL	F09620-XXL

HANNOVER, FREIBURG, LÜNEBURG, FRANKFURT, MAINZ
Die Vorfußschutzkappe kann ganz einfach außen am Schuh angebracht werden und schützt den Fuß vor Nässe und Kälte.



LAUFSOHLENMATERIAL, GUMMI

Art.-Nr.	ME	Abmessung [mm]
F00092-S	Platte	220 x 110 x 1,5
F00092-M	Platte	295 x 145 x 1,5
F00092-L	Platte	357 x 158 x 1,5



KLETTBAND

Größe	Art.-Nr.	Maße
XS - XXL	F00002-S	50 x 200 mm



KLETTGURT

Größe	Art.-Nr.	Maße
XXS - XXL	F00001-L	25 x 650 mm



SCHUTZBÜGEL KAISERSLAUTERN

Größe	Art.-Nr.
S	F01000-Z0
L	F01000-Z1

inklusive Montageset



SCHUTZBÜGEL BERLIN

Größe	Art.-Nr.
S	F01000-Z5
M	F01000-Z6
L	F01000-Z7
XL	F01000-Z8

inklusive Montageset

SCHUTZBÜGEL BORDEAUX

Größe	Art.-Nr.
S	F01000-Z9
M	F01000-Z10
L	F01000-Z11
XL	F01000-Z12

inklusive Montageset

THERAPIESCHUHE DIABETES



Sie finden unseren Therapieschuhkatalog
DIABETES auch online auf unserer Website
im Downloadbereich unter:
www.fior-gentz.de/download

THERAPIESCHUHE HOMECARE



Sie finden unseren Therapieschuhkatalog
HOMECARE auch online auf unserer Website
im Downloadbereich unter:
www.fior-gentz.de/download

Die Angaben des Kataloges beziehen sich auf den aktuellen Stand bei Drucklegung. Produktangaben sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Urheberrechte, besonders die Rechte der Verbreitung, Vervielfältigung und Übersetzung, bleiben ausschließlich der FIOR & GENTZ Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb von orthopädiotechnischen Systemen mbH vorbehalten. Nachdrucke, Kopien sowie sonstige Vervielfältigungen elektronischer Art dürfen auch auszugsweise nicht ohne schriftliche Genehmigung der FIOR & GENTZ Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb von orthopädiotechnischen Systemen mbH vorgenommen werden.



KT2700-DE-05/2016

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.de

